



Ficha Técnica

KIT PARA BAÑO

- MANOPLA DE VISCOSA PLASTIFICADA CON ESPONJA PRE-ENJABONADA Y ELÁSTICO (LAVADO).
- MANOPLA DE VISCOSA PLASTIFICADA CON ELÁSTICO (SECADO).

USO

En todos los Departamentos de Hospitalización, especialmente en: Reanimación, Geriátrica, Neurología, Enfermedades Infecciosas, Pediatría, Cirugía, Neurocirugía, Cardiología, Terapia Intensiva.

CUÁNDO

Para la limpieza del cuerpo de los pacientes momentáneamente inmóviles por causa de una patología, para los incontinentes seniles y para los recién nacidos.

CÓMO

Es suficiente humedecer con agua la superficie de la palma de la mano donde se encuentra la esponja con el jabón y masajear la parte del cuerpo a tratar.

POR QUÉ

Es la solución práctica, higiénica y veloz que mejora la vida del paciente al sentirse aseado. La persona que utiliza este producto está mucho más protegida de contraer infecciones. La particularidad de este producto es que al contacto con el agua se suaviza notablemente y al masajear con delicadeza la parte tratada evita lesiones y abrasiones. Además el uso de la manopla reduce tiempos de baño, cantidad de productos empleados y costos por infecciones.

NOMBRE	CÓDIGO: M3VIPLKIT200
Kit - Manopla de viscosa plastificada con esponja pre-enjabonada elástico, Manopla de viscosa plastificada con elástico	Dispositivo Médico de Clase I No estéril Directiva CEE 93/42 Producto cosmético L. 11 octubre 1986, n. 173



MATERIALES	TIPOLOGÍA	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
VISCOSA	50 gr/mq ±10% tol.	Capacidad de absorción en % 900 (ert 10.2.96)	
		Tiempo de absorción ≤ 2seg (ert 10.2.96)	
		Composición 50% viscosa, 50% Pes	
PELÍCULA PLÁSTICA	25 micron ±5% tol. Película plástica impermeable para uso sin guante de látex.	Resistencia a ruptura N/mm ² MD 32.9 TD 20.4 (ASTM D882)	
ESPONJA PRE-ENJABONADA	125 gr/mq ±15% tol.	Color celeste 85% poliester 15% poliester T.B.	
JABÓN	Jabón-detergente	Color azul Perfumado Índice de irritación primario = 0 Ley 11 de octubre 1986, n. 713, referente a la autorización de la norma de la directiva de la Comunidad Económica Europea de cosméticos.	pH 5±0.5% tol. gr/0.44 tol. ±20% Water, Sodium C12-15 Pareth Sulfate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Imidazolidinyl Urea, Methylparaben, Glycerin, Polysorbate 80, Sodium Dehydroacetate, Citric Acid, Butylparaben, Propylparaben, Citrus Medica Limonum extract & Glycerin, Deionized Water, Chlorhexidine Digluconate, Ethylparaben, Methylparaben, Cocamidopropyl Betaine, CI 42090.
PEGAMENTO	Pegamento para aplicaciones en polietileno y no en tejidos	Transparente	Ningún componente potencialmente dañino de acuerdo a la directriz 67/548/CEE
BOLSA DE EMPAQUE	Poliester	40 micron PET con tecnología de cerrado flowpack	

BOLSA	CAJA	EURO PALLET
20 Kits ±2% tol.	10 bolsas × 20 Kits = 200 Kits Peso 4.6 kg	40 cajas × 200 Kits = 8000 Kits 0.8×1.20×2.20 = 2.11m ³ Peso 184 kg





DIMENSIONES DE LA MANOPLA

SEA MODE[®]



Marc
Pharma
Productos Farmacéuticos

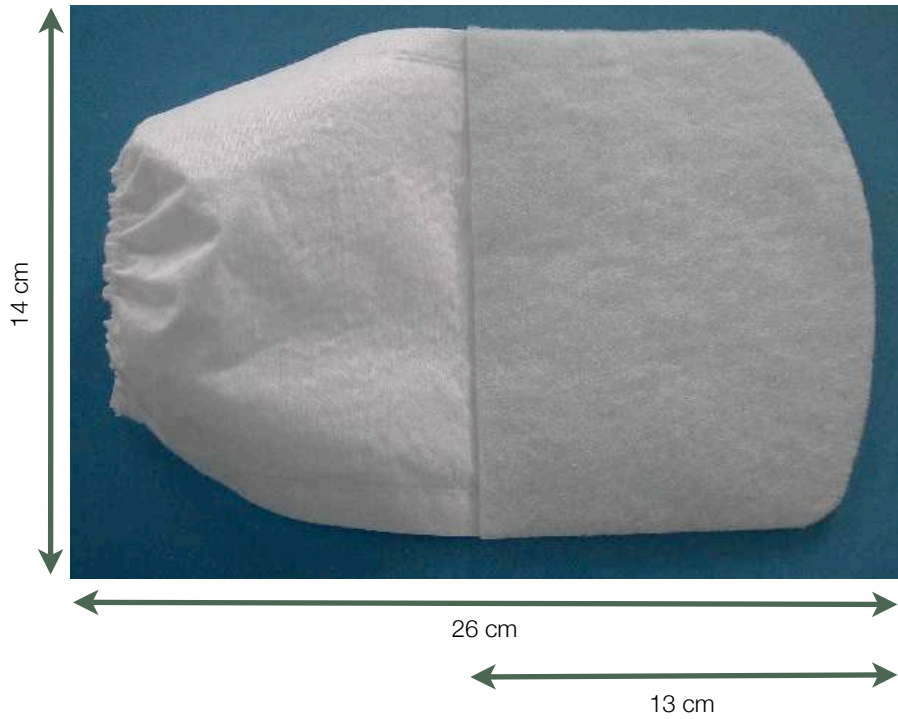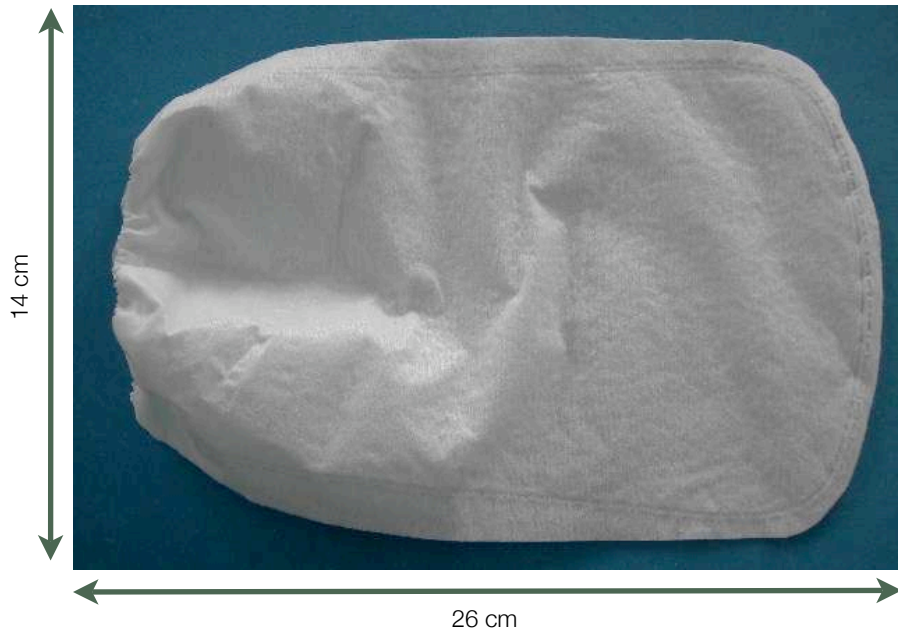

marcpharma.com.mx

Circuito San Eduardo No. 399 int 105, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. ☎ (33) 3169 6802.